



DE **Waskraag**

'Haren wassen zonder Handicap'

De waskraag is een wasbak die ontwikkeld is om de haren te kunnen wassen van klanten die moeite hebben (of het vervelend vinden) om hun hoofd achterover te houden of op een rolstoel zijn aangewezen.

De wasbak wordt bij de klant omgehangen en rust op de schouders van de klant. Het geheel wordt afgedicht met een nekmanchet. Hierdoor kunnen de haren gewassen worden in een normale zitstand, waarbij het hoofd niet naar achteren hoeft en de klant zelf droog blijft. Iedere klant kan met deze wasbak gewassen worden.

Dat de klant in "zitstand" gewassen kan worden, zorgt ervoor dat degene die het haar wast dit alleen en in een juiste houding kan doen. Dit maakt de waskraag "onmisbaar" voor zorgcentra.

De waskraag is zeer sterk en toch licht (ook voor de schouders van de klant). Het beperkte gewicht en het feit dat iedereen ermee gewassen kan worden, maakt de waskraag ook zeer geschikt voor verplegend personeel, thuiszorgmedewerkers en ambulante kappers.

Voor meer informatie:

WWW.WASKRAAG.NL

info@waskraag.nl

06 - 3096 1946 (Robert Jorritsma)



Gebruikshandleiding en tips voor gebruik van de waskraag

Bevestig de slang op de zwarte afvoerpijp en sluit deze aan op een lage afvoer.

Meestal wordt (in de kapsalon) de bestaande afvoerpijp in de muur gebruikt, waar de staande wasbak op is aangesloten. Mocht er geen lage afvoer aanwezig zijn, bestel dan de speciale jerrycan (19 liter) met speciale afsluitdop waar de slang op vastgezet kan worden. Een emmer (10 liter) of de afvoer van een douche is uiteraard ook mogelijk (alleen moet iemand anders dan wel de slang vasthouden) ter indicatie: het kost ca. 6 liter water om iemand met kort haar te wassen.

Doe de klant een verfschort om.

Hierdoor kan de klant, bij eventueel losschieten van de manchet of spetteren, toch nog (deels) droog blijven.

Plaats de wasbak over het hoofd van de klant, met de afvoerpijp naar voren.

Laat de klant zoveel mogelijk rechtop zitten, het hoofd niet te ver achterover. Zorg dat de waskraag zo omgehangen wordt, dat het water naar de afvoerpijp toe kan stromen.

Schuin geplaatst werkt de bak ook. Draai de achterkant van de bak schuin achter het hoofd en laat de afvoer naast de zij van de klant weglopen. Dit werkt bijvoorbeeld bij mensen die op bed liggen of bij dames met grote borsten of klanten met een dikke buik. (waar vervolgens de onderkant van de bak op rust, en de afvoer omhoog komt te liggen)

Doe de manchet om de nek, met het klittenband aan de voorzijde.

De nekmanchet voldoende strak omhangen. Dit is het minst comfortabele onderdeel van de waskraag, maar als dit niet strak tegen de nek zit, loopt het water tussen de nek en de manchet langs. Als je de mensen een handdoek om de nek doet, zorg er dan voor dat deze niet tussen de nek en het manchet komt. (Anders wordt de handdoek nat en vervolgens de klant ook)

Als er teveel water in de achterkant van de bak blijft staan,

Stop dan met watertoevoer want dan is er sprake van een foute houding. In de juiste houding loopt het water altijd naar voren / afvoergat

Let op dat het water goed wegstroomt bij het afvoergat.

Als het water niet goed wordt afgevoerd, kijk dan of de slang omhoog loopt. Desnoods tussendoor even stoppen met water toevoer.

Bij mensen in rolstoelen met een hoge rugleuning kun je een **stapel handdoeken in de rug** plaatsen, waardoor ze meer naar voren komen. (Vervolgens past de kraag er wel tussen de nek en de leuning)

Om te voorkomen dat **verf- of permanentvloeistoffen** bij het uitspoelen in de ogen komen, kan je een **washandje tegen het voorhoofd** houden en de douche van voor naar achter laten sproeien.

De **manchet** kan gemiddeld 1500 tot 1800 keer gebruikt worden.

Schoonmaken kan met groene zeep. Niet in de wasmachine of chemisch reinigen. Hierdoor kan de lijmlaag van de celstructuur worden aangetast.

De manchet na gebruik a.u.b. niet dubbelgevouwen wegleggen.

Ook dit zal de celstructuur van de manchet aantasten.



DE **Waskraag**

'Haren wassen zonder Handicap'

